

# Alles gurgelt!

Güvenli bir anaokulu için.



## 1 yaşından itibaren çocuklarla nasıl gargara yapılır

1




'Alles gurgelt' test seti ile çocuğunun Corona virüsüyle enfekte olup olmadığını anlayabilirsin. İlk test seti sana anaokulunda verilecektir.

2



Akıllı telefonunla test setinin arkasında bulunan **QR kodunu tara** ya da internette [allesgurgelt.at](https://allesgurgelt.at) sayfasına gir. **Kayıt** olduktan sonra veya daha önce bir **profil** oluşturduysan profiline giriş yap ve test setinin içinde bulunan kullanım kılavuzunda yazılı olan numune numarasını ekle. Bunu onayladıktan sonra kişisel verilerinin bulunduğu giriş sayfası açılacaktır. Burada **'Person hinzufügen'** ('kişi ekle') butonu bulunmaktadır. Buraya çocuğunun verilerini ekle. O da senin profilin üzerinden test olabilir. Şimdi çocuğunun adını seç ve teste başla. Çocuğunla testi sonuna kadar uyguladıktan sonra, bir dahaki test için çocuğunun verileri otomatik olarak kayıt edilir.

3

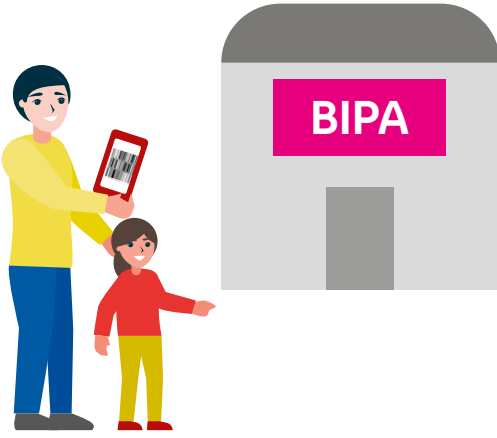

Kayıt olduktan sonra web uygulamasından **kişiy atanmış barkodu** sorgulayabilirsin. Bu barkod ile her **BİPA şubesinde** sürekli **yeni bir test seti** alabilirsin.

4



Gargara testine en iyisi evde çocuğunla birlikte alıştırma yaparak hazırlan. **Gargara yapmayı** su, çay veya meyve suyuyla deneyin. Çocuğuna nasıl gargara yapması gerektiğini göster. Gargara yaparken en iyisi kendi sesinizi kullanın veya en çok sevdiğiniz şarkıyı gargara yaparak söyleyin. Küvette veya banyoda da gargara yapmak eğlenceli olur.

Çocuğın daha gargara yapamıyorsa sıvıyı ağızda sadece çalkalasa da olur.

Devamı için çevirin →

5



Son olarak çocuğuna, sıvıyı bir **pipet** aracılığıyla nasıl başka bir kaba boşaltabileceğini **göster**. Bunun için ağzına bir yudum su, çay ya da meyve suyu al, pipeti ağzına götür ve ağzındaki sıvıyı dikkatlice bir bardağın içine boşalt.

Önemli olan bunu çocuğunla birlikte yapmandır. Bir şeyleri birlikte yapmak daha eğlenceli olur ve çocuğun seni izleyerek öğrenebilir.

6



0 ile 5 yaş arasında küçüklerin güncel düzenlemelere bağlı olmak üzere restorana ya da etkinliklere gidebilmek için **AB uyumlu karekodlu bir test sertifikasına** ihtiyaçları olmadığından test yaparken video çekimini onaylamak zorunda değilsin. Bu adımı atlayabilirsin. Çocuğuna gene de bir **test sonucu** gönderilecektir.

6 yaş ve üstü çocuklar için bulguyu giriş testi olarak kullanmak istersen video çekimini onaylamak zorundasın.

7



Haydi başlayalım! İçinde **numune sıvısı** bulunan küçük plastik tüpü eline al ve içinde bulunan sıvıyı çocuğunun ağzına boşalt. Sıvıyı önce bir kaşığa boşaltıp çocuğunun ağzına kaşıkla da verebilirsin.

8



**Şimdi gargara yapıyoruz** – daha önce çalıştığınız gibi. Çocuğun biraz sıvı yutsa da endişelenmene gerek yok. En iyi sonucu elde etmek için en azından bir dakika boyunca gargara yapsa iyi olur. Gargara yapmaya ara verip dinlenmesi de mümkündür.

10



Başardın! Artık sadece numune tüpünü kapatıp bunu test setinin içinde bulunan kullanım kılavuzunda yazdığı şekilde paketlemen gerekir. Testi kolayca aşağıdaki toplama yerlerinden birine teslim edebilirsin:

- **Ptesi-Ctesi:** Viyana'daki **her REWE şubesinde** (BIPA, BILLA, BILLA PLUS, PENNY) ve ayrıca **benzin istasyonlarında** (BP, SHELL, JET, OMV ya da ENI) ve **ÖBB garlarında** (West, Meidling, Hauptbahnhof)
- **Pazar ve bayram günleri:** Benzin istasyonlarında, Meidling ve Hauptbahnhof garlarında (Toplama saatleri: 9 ve 14)

9



Gargara yaptıktan sonra çocuğun bir pipet aracılığıyla **sıvıyı** ağzından **numune tüpüne** boşaltmalıdır. Bunu da daha önce çalıştığınız için pek zor olmayacaktır. Çocuğunuz sıvıyı pipetten geçiremezse küçük bir huni de kullanabilirsiniz.

11



Numuneyi saat 9'dan önce teslim edersen çocuğunun **test sonucu** genelde **24 saat içinde** e-posta ile gönderilir. 'Alles gurgelt!' test programına düzenli olarak katılırsanız anaokulunda ve boş vakitlerde zaman her çocuk için daha güvenli geçer.