

Alles gurgelt!

Gurgel mit!



1



Informiere und registriere dich auf allesgurgelt.at. Nach erfolgreicher Registrierung erhältst du einen personalisierten Barcode mit dem du immer wieder bis zu **8 Test-Sets** in jeder Wiener BIPA-Filiale abholen kannst.

2



Gehe nun unter allesgurgelt.at auf „**Jetzt testen**“, melde dich an. Folge der Anleitung in der Web-App und führe den Test durch.

3



Bestätige für den Test **deine Identität**, indem du Reisepass, Personalausweis oder e-card in die Kamera zeigst.

4



Stimmst du einer **Aufzeichnung** beim Testverfahren zu, erhältst du mit dem negativen Testergebnis ein **Testzertifikat mit EU-konformem QR-Code** für den Zutritt, je nach aktueller Verordnung, zu Restaurants, Fitness-Centern und Veranstaltungen. Diesen Schritt kannst du auch überspringen, du erhältst dann zwar dein Testergebnis, aber kein gültiges Testzertifikat.

5



Führe den **Test** durch. Es kann gegurgelt oder im Mund gespült werden.

6



Gib die **Probe** wieder in die LEAD Horizon-Verpackung, nachdem du den Test durchgeführt hast.

7



Gib den Test nun bequem ab:

- **Mo-Sa:** bei allen **REWE-Filialen in Wien** (BIPA, BILLA, BILLA PLUS, PENNY) sowie **Tankstellen in Wien** (von BP, SHELL, JET, OMV und ENI) und **ÖBB Bahnhöfen** (West, Meidling, Hauptbahnhof)
- **Sonn- & Feiertage:** Tankstellen, Bahnhöfe Meidling & Hauptbahnhof (Abholung 9 und 14 Uhr)

8



Bei **Abgabe vor 9 Uhr** erhältst du dein Ergebnis per E-Mail innerhalb von 24 Stunden.

9



Du bist **bereits geimpft**? Teste dich trotzdem regelmäßig, um andere zu schützen!
Du bist **nicht geimpft**? Informiere dich unter impfservice.wien und lass dich impfen, um dich selbst zu schützen!

Stadt
Wien

Alle Infos unter: allesgurgelt.at
#allesgurgelt