

“Alles gurgelt!”

Pridruži se i grgljaj i ti!



1



Informiši i registruj se na allesgurgelt.at. Nakon uspješne registracije dobit ćeš personalizirani bar-kôd sa kojim u bilo kojoj BIPA filijali u Beču svaki put možeš dobiti do **8 testnih kompleta**.

2



Otiđi sada na stranicu allesgurgelt.at i klikni na “**Testirajte se SADA**” te se prijavi. Slijedi upute u web aplikaciji i uradi test.

3



Potvrdi svoj identitet za test, držeći pasoš/putovnicu, ličnu kartu/osobnu iskaznicu ili e-karticu u kameru.

4



Ako pristaneš na **videosnimanje** tokom testiranja, izdat će ti se u slučaju negativnog testa **medicinski laboratorijski nalaz** za npr. odlazak kod frizera ili u druge poslovne objekte. Taj korak možeš i preskočiti. U tom slučaju ćeš dobiti rezultat testa, ali ne i zvanično važeći nalaz.

5



Sada uradi **test**. Možeš grgljati ili isprati usta.

6




Nakon što uradiš test, stavi **uzorak** u LEAD Horizon pakovanje.

7



Sada jednostavno predaj test u bilo kojoj **REWE filijali u Beču** (BILLA, BILLA Plus, BIPA i Penny te prodavnice benzinskih stanica BP-Merkur Inside, JET-BILLA Stop & Shop, SHELL-BILLA Unterwegs).

8

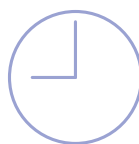

Ako test predaš prije 9 sati, dobit ćeš svoj rezultat putem e-maila u roku od 24 sata.