

Alles gurgelt!

Gurgel mit!



1



Informiere und registriere dich auf allesgurgelt.at. Nach erfolgreicher Registrierung erhältst du einen personalisierten Barcode mit dem du immer wieder bis zu **8 Test-Sets** in jeder Wiener BIPA-Filiale abholen kannst.

2



Gehe nun unter allesgurgelt.at auf „**Jetzt testen**“, melde dich an. Folge der Anleitung in der Web-App und führe den Test durch.

3



Bestätige für den Test **deine Identität**, indem du Reisepass, Personalausweis oder e-card in die Kamera zeigst.

4



Stimmst du einer **Videoaufzeichnung** beim Testverfahren zu, wird dir nach negativem Testergebnis ein **medizinischer Laborbefund** für den Zutritt zu Friseuren oder anderen Betrieben sowie Veranstaltungen ausgestellt. Diesen Schritt kannst du auch überspringen, du erhältst dann zwar dein Testergebnis, aber keinen offiziell gültigen Befund.

5



Führe den **Test** durch. Es kann gegurgelt oder im Mund gespült werden.

6



Gib die **Probe** wieder in die LEAD Horizon-Verpackung, nachdem du den Test durchgeführt hast.

7



Gib den Test nun bequem in jeder **REWE-Filiale in Wien** ab (BILLA, BILLA Plus, BIPA und Penny sowie bei den Tankstellenshops BP-Merkur Inside, JET-BILLA Stop & Shop, SHELL-BILLA Unterwegs).

8



Bei **Abgabe vor 9 Uhr** erhältst du dein Ergebnis per E-Mail innerhalb von 24 Stunden.

Stadt Wien

Alle Infos unter: allesgurgelt.at
#allesgurgelt