

Alles gurgelt!

Gurgel mit!



1



Hol dir deinen Einstiegs-Barcode über allesgurgelt.at und erhalte durch Vorzeigen in jeder Wiener BIPA-Filiale bis zu **8 Test-Sets**.

2



Gehe im Internet-Browser unter lead-horizon.org/public auf die Web-App und melde dich durch die Eingabe der Proben-Nummer an. Nach erfolgter Registrierung bekommst du einen **personalisierten Barcode**, mit dem du immer wieder Test-Sets abholen kannst. Folge der Anleitung in der Web-App und führe den Test durch.

3



Bestätige für den Test **deine Identität**, indem du Reisepass, Personalausweis oder e-card in die Kamera zeigst.

4



Stimmst du einer **Videoaufzeichnung** beim Testverfahren zu, wird dir nach negativem Testergebnis ein **medizinischer Laborbefund** für bspw. Friseure oder andere Betriebe ausgestellt. Diesen Schritt kannst du auch überspringen, du erhältst dann zwar dein Testergebnis, aber keinen offiziell gültigen Befund.

5



Führe den **Test** durch. Es kann gegurgelt oder im Mund gespült werden.

6




Gib die **Probe** wieder in die LEAD Horizon-Verpackung, nachdem du den Test durchgeführt hast.

7



Gib den Test nun bequem in jeder **REWE-Filiale in Wien** ab (BILLA, BILLA Plus, BIPA und Penny sowie bei den Tankstellenshops BP-Merkur Inside, JET-BILLA Stop & Shop, SHELL-BILLA Unterwegs).

8

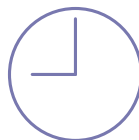

Bei **Abgabe vor 9 Uhr** erhältst du dein Ergebnis per E-Mail innerhalb von 24 Stunden.

**Stadt
Wien**

Alle Infos unter: allesgurgelt.at
#allesgurgelt